

سیفتی باکس



۱. هرگونه وسایل یکبار مصرف تیز و برنده که در تشخیص، درمان و مراقبت بیماران استفاده می شود از قبیل سرسوزن، تیغ بیستوری، اره، اسکالپ، لانست، انواع آنژیوتکت، فرآورده های خونی و دارویی، شیشه های شکسته و... بایستی در این ظروف جمع آوری و دفع گردد.
۲. با توجه به اینکه پسماندهای دفع شده داخل سیفتی باکس عفونی و خطرناک می باشند سیفتی باکس حداکثر تا رسیدن به خط نشانه در واحد نگهداری شده و پس از پلمپ شدن بلافاصله دفع گردند.
۳. در تمامی بخش ها و قسمت های مورد نیاز این ظروف باید در تعداد و حجم های مناسب تهیه و در اختیار پرسنل تولید کننده پسماند نوک تیز قرار گیرد.

سیفتی باکس

۴. قبل از استفاده از این ظروف بررسی شود حتما برچسب پسماند خطرناک و برچسب مشخصات تولید کننده پسماند نوک تیز بر روی ظرف نصب شده باشد و نسبت به تکمیل برچسب در محل استفاده از این ظروف اقدام گردد.
۵. پس از اینکه ۳/۴ حجم سیفتی باکس پر شد بایستی درب آن را قفل نموده، چسب زده و به عنوان پسماند عفونی دفع گردد.
۶. هرگز محتویات سیفتی باکس را خالی نکرده و به هیچ عنوان مجدد از ظرف استفاده نشود.
۷. زمانی که از سیفتی باکس استفاده نمی شود درب آن بسته (قرار دادن بر روی درجه شماره ۱) و زمانی که تا حجم ۳/۴ پر شد جهت دفع ظرف، درب آن بایستی قفل گردد (قرار دادن بر روی درجه شماره ۲).
۸. لازم به ذکر است در آزمایشگاه و مکانهایی که نمونه گیری خون انجام می شود ضروری است که نیدل از سرنگ جدا گردد سرنگ در سطل زباله عفونی و نیدل در سیفتی باکس دفع گردد و در سایر موارد ترجیحاً سرنگ با نیدل دفع گردد.

- آئین نامه اجرایی پسماندهای پزشکی مصوبه هئیت وزیران در سال ۸۷
- دستور العمل تزریقات ایمن
- سایت بهداشت محیط ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
بیرجند
معاونت بهداشتی



سیفتی باکس

گروه مدیریت شبکه (واحد امور پرستاری)

سیفتی باکس

سیفتی باکس با نام علمی **Sharps Container** ظرفی است از مواد پلیمر نفتی و کاملاً یکبار مصرف با قابلیت نگهداری و حفظ پسماندهای تیز و برنده و همچنین سرنگ های پزشکی، که پس از پرشدن تا خط نشانه، توسط درپوش قرمز رنگ کاملاً پلمپ شده و سپس دفع بهداشتی می شود. مواد بکار رفته امکان بازگشت سیفتی باکس به طبیعت را پس از دفع و سوزاندن فراهم می کند و کاملاً برای محیط زیست بی خطر است.

دهانه تعبیه شده بر روی در زرد رنگ، در وسط آن قرار گرفته (به استثنای ظروف ۷ و ۱۲ لیتری) تا امکان استفاده از محصول از هر جهت فراهم باشد. همچنین ابعاد دهانه به گونه ایست که ضمن وارد شدن ساده اشیاء با هدایت دست به داخل آن، امکان خروج آن ها را در صورت سقوط احتمالی به حداقل برساند.

در زمان های توقف کار با سیفتی باکس حتماً باید درپوش قرمز رنگ را بطور عادی (موقت) محکم کنید تا در صورت سقوط احتمالی یا برگشتن ظرف، اشیاء آلوده به خارج راه نیابد.

سیفتی باکس

زمانی که سیفتی باکس تا خط نشانه پر شد حتماً باید درپوش قرمز رنگ را به حالت معکوس (وارونه) سوار کرده و آنرا محکم فشار دهید تا قفل شود. شیارهای تعبیه شده روی در این امکان را به مصرف کننده می دهد که با یک دست و بدون آلوده شدن دست و قسمت های دیگر سیفتی باکس، اشیاء تیز را روی شیارها با توجه به سایز و شکل شی، محکم کرده و آنها را از پایه جدا کند. ابعاد ظرف با توجه به کاربرد آن ها برای حجم های ۰/۵، ۱، ۲، ۵، ۷، ۱۲ لیتری تعریف شده است.



روی سطح ظرف یک خط نشانه، سطح صیقلی و ناصاف را از هم جدا می کند. این خط **Maximum Filling Line** یا خط حداکثر ظرفیت می باشد که ظروف جهت ایمنی هرگز نباید بیشتر از این خط پر شوند.

سیفتی باکس

سیفتی باکس با کمک رزوه های تعبیه شده در کف ظرف به پایه (هولدر) که بسته به مورد استفاده بصورت دیواری، چسبی روی میزی و گیره ای روی میزی جهت حجم های ۰/۵، ۱ و ۲ لیتری طراحی شده اند، محکم می شود تا از حرکت آن در هنگام استفاده از شیارهای تعبیه شده روی سطح فوقانی سیفتی باکس که جهت تسهیل در جدا سازی اشیاء تیز از پایه می باشد، اجتناب گردد.

نحوه مونتاژ سیفتی باکس:

- ۱- ابتدا در را روی ظرف با زاویه ای مناسب در یک قسمت کاملاً محکم نمایید.
- ۲- با ثابت نگه داشتن قسمت محکم شده، از همانجا سایر قسمت های در را روی ظرف سوار کرده و مطمئن شوید در روی ظرف کاملاً چفت شده باشد. (در سیفتی باکس های ۷ و ۱۲ لیتری، دسته نیز باید روی ظرف، مونتاژ شود.)

